

Mobilex Teleskop-Rampen Modell TM-055, TM-150, TM-210 und TM-300

Montage- und Gebrauchsanleitung



strack Patienten-
und Pflegebedarf

Strack AG
Ebnatstrasse 125
8200 Schaffhausen

052 630 31 60
www.strack.ch
info@strack.ch

1. Einleitung

Sehr geehrter Kunde,

Sie haben sich für ein hochwertiges Mobilex Produkt entschieden und darüber freuen wir uns sehr. Diese Gebrauchsanleitung enthält eine genaue Beschreibung des Produktes und wichtige Hinweise für dessen korrekten Gebrauch. Bitte lesen Sie daher vor Gebrauch des Produktes diese Anleitung sorgfältig durch. Beachten Sie bitte alle Anweisungen, besonders die Sicherheitshinweise und folgen Sie diesen jederzeit um einen sicheren und dauerhaften Einsatz des Produktes zu gewährleisten.

Zweckbestimmung

Mobilex-Rampen sind mobile, transportable Rampensysteme zum Befahren mit dem Rollstuhl. Sie ermöglichen die Überwindung von Höhenunterschieden mit oder ohne Fremdhilfe (z.B. Treppenstufen). Die Mobilex-Rampen ermöglichen somit den Patienten, die aufgrund einer Mobilitätseinschränkung auf einen Rollstuhl angewiesen sind, ein Gebäude zu verlassen bzw. aufzusuchen und tragen somit zur Befriedigung der Grundbedürfnisse bei. Sie können im Außen- und Innenbereich angewandt werden.

Kontraindikation

Es sind keine Kontraindikationen bekannt

Bei Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder direkt an Mobilex A/S

Mobilex A/S

Grønlandsvej 5
DK-8660 Skanderborg
Dänemark

Telefon: +45 87 93 22 20
Telefax: +45 87 93 17 77
E-Mail: info@mobilex.dk


2. Sicherheitshinweise

- Benutzen Sie das Produkt nur wenn es sich in einwandfreiem technischen Zustand befindet
- Falls Sie irgendwelche Beschädigungen oder Fehler am Produkt vorfinden, kontaktieren Sie bitte umgehend Ihren Händler.
- Beachten Sie die Angaben auf dem Produkt-Aufkleber.
- Die Rampen sind bis zu max. folgenden Höhenunterschieden geeignet:
TM-055: 11 cm, TM-150: 30 cm, TM-210: 40 cm, TM-300: 60 cm
- Bitte nutzen Sie die Rampen nur für den vorgesehenen Einsatzbereich (*siehe Zweckbestimmung*)
- Wenn die Rampen auseinandergeklappt werden, muss der Benutzer darauf achten, dass Finger oder andere Körperteile nicht eingequetscht werden
- Die Rampen dürfen nur auf waagrechtem, stabilen Boden verwendet werden

3. Beschreibung

Produkt Beschreibung

Die Alligator Rampen der Serie TM bestehen aus Aluminium.

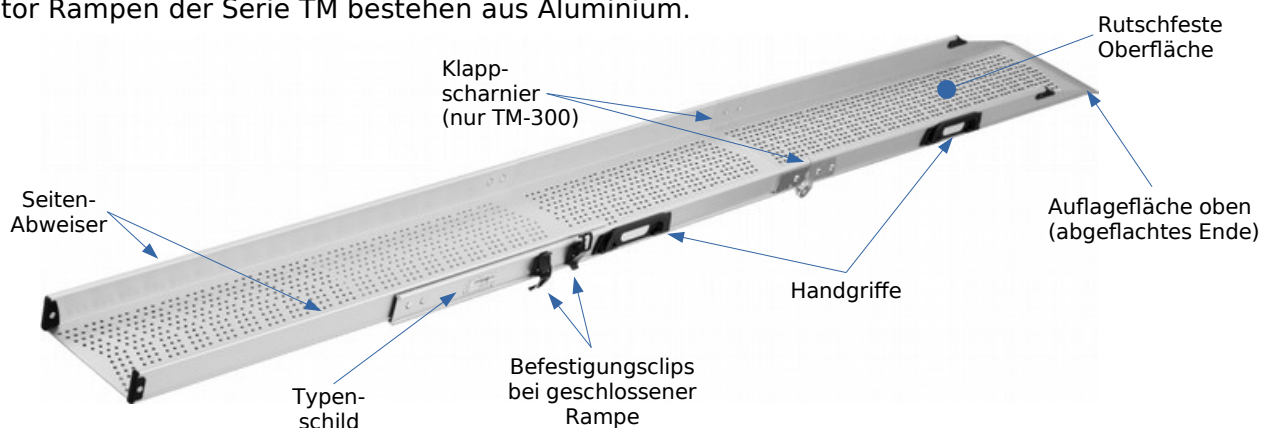

Lieferumfang

Die TM Rampen werden gefaltet in einem Karton mit folgendem Inhalt geliefert:

- ✓ 2 Rampenteile (Schienen)
- ✓ diese Bedienungsanleitung

Montage- und Funktionsbeschreibung

- Die TM-055 bestehen aus zwei einzelnen Schienen, die Modelle TM-150 und TM-210 bestehen aus jeweils 2 Teleskop-Elementen, das Modell TM-300 hat ein zusätzliches Element das aufgeklappt wird. Um die Rampen aufzuklappen, öffnen Sie die Befestigungsclips (siehe Bild oben) an den Rampenteilen .
- Die Auflagebleche der Rampen müssen stets auf einem stabilen und waagrecht Untergrund platziert werden. Die abgeflachten Enden der Rampe (siehe Bild oben) müssen oben liegen und auf dem Hindernis aufliegen.
- Ordnen Sie beide Rampen so zueinander an, dass die Räder des Rollstuhls mittig auf die Spur der Rampen treffen und beide Rampenschienen parallel zueinander liegen.
- Prüfen Sie die Rampen vor jedem Befahren auf eine sichere, stabile Lage.

Handhabung beim Transport

Die TM-055 bestehen aus zwei einzelnen Schienen, die TM-150 und TM-210 Rampen haben 2 teleskopische Elemente die für den Transport zusammen-geschoben und fixiert werden können (Teleskop-Rampen). Das Modell TM-300 hat ein zusätzliches Element das zusammengeklappt werden kann. Zum Transport müssen die Befestigungsclips (siehe Bild oben) geschlossen werden.

Optionen / Zubehör

Für die Rampen der TM-Serie ist kein weiteres Zubehör verfügbar.

4. Technische Daten

TM Rampen	TM-055	TM-150	TM-210	TM-300
Länge	55 cm	150 cm	210 cm	300 cm
Breite (pro Schiene)	25 cm	25 cm	25 cm	26 cm
Laufflächen Breite	20 cm	20 cm	20 cm	20 cm
Höhe Radabweiser	5,5 cm	5,5 cm	5,5 cm	5,5 cm
Max. Steigung / Höhe	12° / 11 cm	12° / 30 cm	12° / 40 cm	12° / 60 cm
Gewicht	2 x 1,45 kg	2 x 3,95 kg	2 x 5,8 kg	2 x 8,65 kg
Max. Belastung pro Paar	300 kg	300 kg	300 kg	250 kg
Faltmasse cm (L x B x H)	55 x 25 x 5,5	98 x 27x 9	128 x 27 x 9	108 x 26 x 13,5

Typenschild

Das Typenschild befindet sich außen an einem der Radabweiser

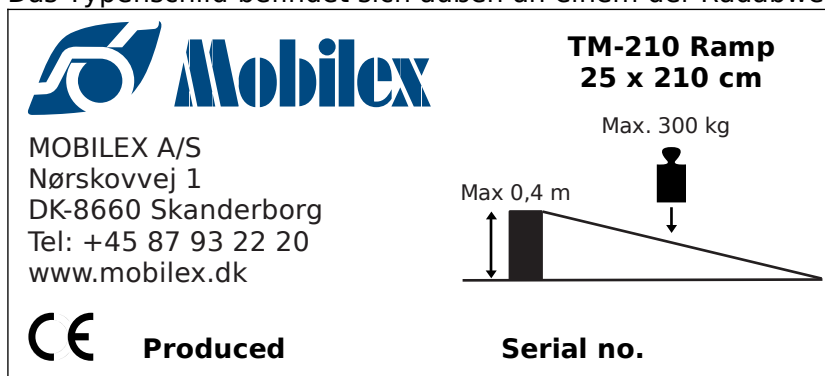


Abbildung des Typenschildes (nicht originales Beispiel)

5. Wartung und Pflege / Wiedereinsatz

Normale Verschmutzungen an Metall- und Kunststoffteilen lassen sich mit handelsüblichen Reinigungsmitteln entfernen. Beachten Sie deren spezielle Produktinformation und verwenden Sie ausschließlich handelsübliche Reinigungsmittel, die für die Reinigung bzw. Desinfektion geeignet sind (keine Lösungs- oder Scheuermittel).

Trotz der stabilen Bauweise und der Verwendung von widerstandsfähigen, korrosionshemmenden und wetterbeständigen Materialien unterliegt das Produkt einem gewissen Verschleiß. Es wird daher empfohlen, das Produkt in regelmäßigen Abständen, mindestens jedoch einmal jährlich von einem Fachmann kontrollieren zu lassen.

Die Rampe ist zum **Wiedereinsatz** geeignet. Für den Wiedereinsatz muss die Rampe zunächst gemäß der angegebenen Pflege- und Wartungsbedingungen behandelt werden. Bei Beschädigungen ist das Produkt auszutauschen. Mit dem Produkt muss die Dokumentation, bestehend aus dieser Gebrauchsanweisung übergeben werden.

6. Allgemeine Problembhebungen

Problembeschreibung	Mögliche Ursache	Was ist zu tun
Die Rampe lässt sich nicht öffnen	Der Arretierungsmechanismus ist geschlossen	Öffnen Sie den Arretierungsmechanismus und die Rampe
Die Rampe liegt nicht stabil	Die Oberfläche der Auflage ist nicht eben	Kontrollieren Sie die Auflagepunkte der Rampe. Versetzen Sie evt. die Rampe etwas.
Die Rampe liegt nicht stabil	Die Rampe liegt verkehrt herum	Kontrollieren Sie dass die Auflegfläche (das abgeflachte Ende) oben liegt

7. Entsorgung des Produktes

Das Produkt kann nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden sondern muss zur lokalen Müllentsorgungsstelle gebracht werden.

8. Garantie

Mobilex A/S bietet 2 Jahre Garantie auf Schäden die durch Produktionsfehler oder Materialfehler verursacht sind. Die Garantie erlischt bei nicht bestimmungsgemäßer Reparatur, Wartung oder Verwendung des Produkts. Teile mit normalem Verschleiß unterliegen nicht der Gewährleistung. Bei Produktänderungen ohne unsere schriftliche Zustimmung erlischt die CE-Kennzeichnung und unsere Produkthaftung. Im Falle von Produktschäden, die durch diese Garantie abgedeckt sind, benachrichtigen Sie bitte Ihren Händler oder Mobilex A/S direkt. Die Garantie deckt keine Transportkosten und keinen Schadenersatz während der Reparatur und den keinen Personenschaden. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Verletzungen oder andere Schäden, die auf Nicht-Einhaltung von der Gebrauchsanweisung zurückzuführen sind.

9. Konformitätserklärung (CE)

Die Firma Mobilex A/S, Grønlandsvej 5, 8660 Skanderborg, Dänemark erklärt hiermit, dass die



Mobilex Rampen Modell TM-055, TM-180, TM-210 und TM-300

in Übereinstimmung mit der technischen Dokumentation entworfen und hergestellt wurde und die **Richtlinie des EU Rates 93/42/EWG für Medizinprodukte** erfüllt

Skanderborg, am 11.04.2018


.....
Lars Nygaard, Geschäftsführer