



Positionierungshilfen KUBIVENT PurplePos

Mit Mikroperlen-
System

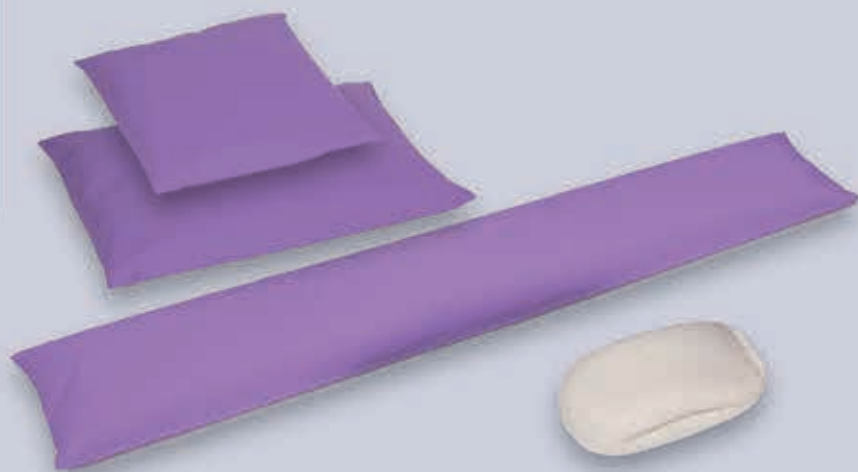

Mit Sandwich-
System

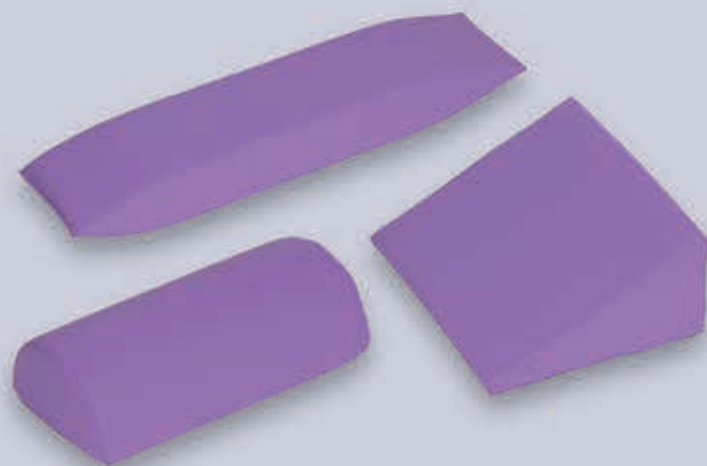

**NEU IM
PROGRAMM**

strack Patienten-
und Pflegebedarf

KUBIVENT PurplePos

Die neue Art der Positionierungshilfen

Auf den ersten Blick macht die Farbe Lila den Unterschied. Sie wurde bewusst gewählt, da sie auf den Patienten beruhigend wirkt und den gewünschten Entspannungszustand positiv unterstützt.

Mehr noch stehen aber mit KUBIVENT PurplePos zwei Systeme im Fokus, die von qualifizierten Experten entwickelt wurden, um die optimale Wirkung in jeder Bedarfssituation zu entfalten.

Mit dem Mikroperlen-System und dem Sandwich-System wird das gesamte Spektrum der Positionierungen im pflegerischen Bereich abgedeckt. Ausgesuchte Materialien werden hier mit spezifischen Formen kombiniert, die decubitus-prophylaktisch wie auch -therapeutisch effizient wirken.

Das Mikroperlen-System



Die mit Mikroperlen-System ausgestatteten Positionierungskissen von KUBIVENT sind auf eine optimale Druckentlastung und Entspannung des Patienten ausgelegt. Dafür sorgen kleinste EPS-Perlen, die sowohl die Position des Patienten als auch dessen Bewegungsförderung besonders wirksam unterstützen.

Man kann diese Positionierungskissen sehr individuell modellieren, und dennoch sind sie bei aller Anschmiegsamkeit absolut formstabil! Zudem ist dieses System äußerst geräuscharm und fördert die Körperwahrnehmung.

Das Sandwich-System



Die Positionierungs-Rollen, -Keile und -Kissen sind nach einem Sandwich-System aufgebaut. Sie bieten eine wirkungsintensive Kombination von zwei Schaumstoffarten, die speziell für diese Anwendungen ausgewählt wurden. Der stabilere PU-Schaum-Kern wird dabei von einer weichen Kaltschaum-Schicht ummantelt.

Von beiden Seiten nutzbar, haben diese Positionierungshilfen einen großen Vorteil: Sie können sehr flexibel für unterschiedlichste Anwendungen eingesetzt werden.

Für beide Systeme gilt: Formstabil und trotzdem weich!

Einsatz und Indikationen

Das Programm der KUBIVENT Positionierungshilfen kann für alle üblichen Unterstützungsarten im Pflegebereich eingesetzt werden:

- 30°-Seitenpositionierung
- Mikropositionierung
- 135°-Seitenpositionierung
- Bobath-Positionierung
- Positionierung von Kopf und Extremitäten
- Langsitz
- Nestchen-Positionierung
- Sonstige pflegerisch indizierte Positionierungsunterstützungen

Natürlich sollte dabei immer das individuelle Krankheitsbild beachtet werden.

Als mögliche Indikationen kommen z. B. in Betracht:

- Lähmungen
- Kontrakturen
- Spastiken
- Decubiti
- Verschiedene Positionierungsarten (30°, 45°, 90°, 120°, 135°)
- Atemunterstützende Positionierungen
- Mikropositionierung
- Unterstützung in sitzender Position

Die völlig neue Dimension der Positionierung




Mit Mikroperlen-System



KUBIVENT VariMed

Durch die längliche Ausführung lassen sich die Kissen in individuelle Formen bringen. Durch das Mikroperlen-System im Inneren lässt sich die gewünschte Form stabilisieren.

In den Größen: 180 x 35 cm, 220 x 35 cm, 250 x 35 cm

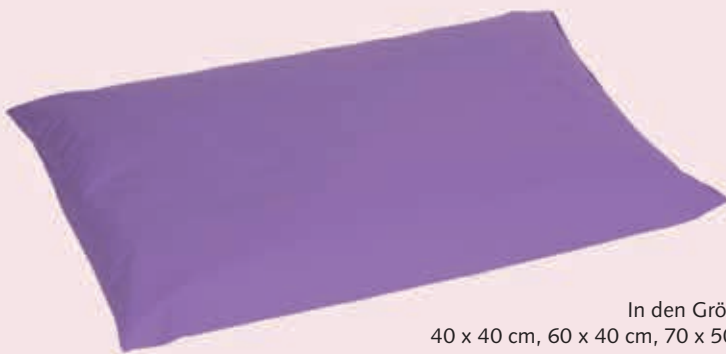

In den Größen:
40 x 40 cm, 60 x 40 cm, 70 x 50 cm

KUBIVENT PhysiForm

Die quadratischen bzw. rechteckigen Universalkissen können je nach Bedarf für die individuelle Positionsunterstützung verwendet werden. Sie nehmen wie die VariMed-Kissen auf angenehme Weise die Körperwärme an und sind gegen Flüssigkeiten jeder Art resistent.

Vorteile

- Äußerst geräuscharme Füllung
- Kleinste Mikroperlen (0,5 -1,0 mm statt herkömmlicher 1,0 -1,5 mm)
- Dadurch sehr gute Modulierbarkeit bei absoluter Formstabilität
- Kissen passen sich dem Patienten an und nicht umgekehrt
- Wahrnehmungs-Förderung durch die bisher unerreichbare individuelle Körperanpassung
- Bewegungsfähigkeit wird unterstützt
- Nur zwei – verformbare – Kissenformen statt einer Vielzahl vorgeformter Kissen



Das Mikroperlen-System

Vorteile inklusive bei der Ausstattung

- Feinste Nahtstabilität
- Feinstes eingearbeitetes Sicherheitsnetz für die Füllung
- Desinfizierbarer Inko-Bezug
- Waschbarer Baumwollbezug inklusive



Das Kissen in der Größe 70 x 50 cm gibt es zusätzlich in einer speziellen Ausführung. Mit seiner stärkeren Füllung eignet es sich vorrangig für die Lagerung des Kopfes, um eine Überdehnung des Nackens zu vermeiden. Optisches Unterscheidungsmerkmal: Weißer Bezug.



Die Füllung kann bequem und einfach durch kreisende Handbewegungen verteilt werden.



Individuelle Modellierung bei hoher Formstabilität.



Eine spezielle Positionierungshilfe

KUBIVENT Handkissen

Individuell modellierbar durch seine Mikroperlen-Füllung. Ideal für die Positionierung der leicht geöffneten Hand. Der abnehmbare Hygiene-Bezug über dem lila Inko-bezug sorgt für den Abtransport von Schweiß, ist bei 60°C waschbar und schnell wieder einsetzbar. Weitere Bezüge können jederzeit nachbestellt werden. Die antibakterielle Wirkung des Bezuges wird durch das Antiseptikum Silber erreicht, das als Faden eingewebt ist. Der Silberanteil beträgt ca. 1%. Bitte bei evtl. Silberallergie berücksichtigen.



Größe: 14 x 11 cm




Mit Sandwich-System



Größe: 25 x 12 x 7,5 cm

KUBIVENT Halbrolle


Optimal für die Fersenfreilagerung und zur individuellen Positionsunterstützung der Beine. Durch die spezielle Schaumstoff-Kombination aus Kalt- und PU-Schaum wird eine angenehme Position mit der nötigen Stützkraft geschaffen.

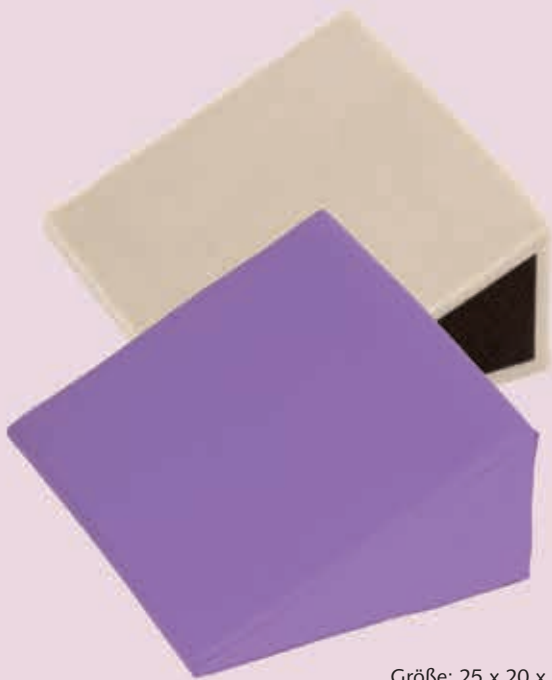

Größe: 25 x 20 x 10-1 cm

KUBIVENT Keil

Geeignet zur Mikrolagerung. Der etwas stabilere Schaumstoff-Innenkern ist an jeder Seite mit einem weicherem Kaltschaum ummantelt. Dadurch ist der Keil flexibel einsetzbar.

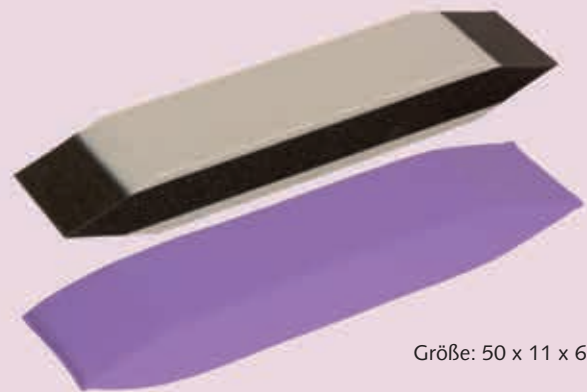

Größe: 50 x 11 x 6 cm

KUBIVENT Keilkissen XS

Zur zeitlich begrenzten Unterstützung von Bewegungsaktivitäten. Ebenso effizient bei der individuell unterstützenden Oberkörperpositionierung. Durch sanften Auslauf der Enden wird eine gute Körperanpassung erzielt. Einsetzbar als Zwischenpolster für die Beine. Platzsparend und leicht anwendbar.

Mehr Vielfalt ist ihre Stärke.

PurplePos-Positionierungshilfen in der Anwendung

Es ist nicht länger nötig, eine Vielzahl unterschiedlichster Positionierungshilfen für unterschiedliche Anwendungen zu haben, um allen Anforderungen gerecht zu werden. Indem wir einzelne Produkte vielseitiger gemacht haben, genügt ein insgesamt kleineres Programm an Hilfen, um das komplette Spektrum der Positionierung abzudecken. Mehr Effizienz ist das Geheimnis von KUBIVENT PurplePos.

Positionierung mit VariMed



A-Positionierung, liegend



U-Positionierung, liegend



A-Positionierung, sitzend



C-Positionierung, sitzend



90°-Positionierung

Positionierung mit VariMed und PhysiForm



30°-Positionierung



45°-Positionierung



135°-Positionierung



Sitzend im Bett



Herz-Bett-Positionierung



Positionierung auf der Bettkante


Positionierung mit PhysiForm



30°-Positionierung



90°-Positionierung

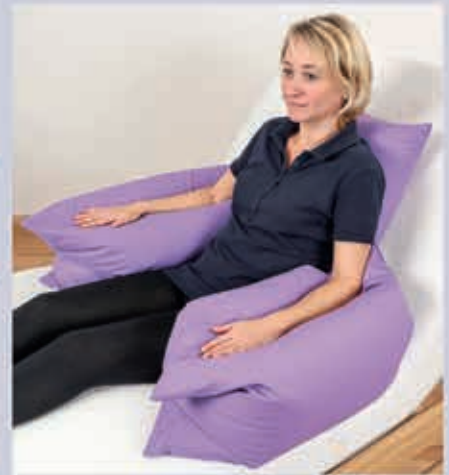

Sitzend im Bett



Sitzend im Bett



Arm-Positionierung



Bein-Positionierung



Fuß-Positionierung



Kopf-Positionierung



Arm-Positionierung im Rollstuhl

Positionierung mit Halbrolle



Arm-Positionierung



Bein-Positionierung



Fersen-Positionierung

Positionierung mit Keilen



Positionierung auf der Bettkante



Mikro-Positionierung



Mikro-Positionierung

Positionierung mit Keilkissen XS



Bein-Positionierungen

Bewegungsfördernde Positionierungen



Auch als Sets in praktischer Tragetasche

Ideal auch für den mobilen Einsatz

Set I:

- 1 KUBIVENT VariMed Positionierungskissen (250 x 35 cm)
- 4 KUBIVENT Positionierungshalbrollen
- 2 KUBIVENT Positionierungskeile

Set II:

- 1 KUBIVENT VariMed Positionierungskissen (220 x 35 cm)
- 1 KUBIVENT PhysiForm Positionierungskissen (40 x 40 cm)
- 1 KUBIVENT PhysiForm Positionierungskissen (60 x 40 cm)
- 2 KUBIVENT Positionierungskeile



Bezüge



Alle Positionierungskissen sind mit einem geschlossenen, vollvernähten Inko-Bezug (lila), ohne Reißverschluss ausgestattet.



Für jede Positionierungshilfe (außer Handkissen) gibt es einen zusätzlichen Baumwollbezug in unterschiedlichen Farben mit verdecktem Reißverschluss. Diese Bezüge sind im Standardlieferumfang enthalten.

Positionierungshilfen von KUBIVENT, dem Spezialisten für Decubitus-Prophylaxe und -Therapie, geben die individuell passende Antwort auf unterschiedliche Bedarfssituationen. Dabei spielt auch eine wirksame Prophylaxe gegen pflegerische Risiken wie das Sturz-, Kontraktur-, Pneumonie-, Thrombose- und auch das Decubitus-Risiko eine wesentliche Rolle. Je nach Befindlichkeit bzw. Krankheitsbild ist das Mikroperlen-System oder das Sandwich-System die optimale Lösung für den, der im Mittelpunkt steht.

Das KUBIVENT PurplePos Programm will das Beste für den Patienten leisten.

strack Patienten-
und Pflegebedarf

Strack AG
Ebnetstrasse 125
8200 Schaffhausen

052 630 31 60
www.strack.ch
info@strack.ch