

Gebrauchsanweisung DEKUSOFT VISCO RZ

Weichlagerungsmatratze zur Dekubitusprophylaxe und -therapieunterstützung

• **Produktbeschreibung**

Die zweischichtig aufgebaute Weichlagerungsmatratze DEKUSOFT VISCO RZ besteht aus einem stützenden, elastischen Schaumstoffkern mit keilförmigen Längs- und Quereinschnitten, die eine würfelfartige Innenstruktur erzeugen, einer unstrukturierten, viscoelastischen Liegefläche und einer festelastischen Randzone. Diese erleichtert und unterstützt die Mobilisierung von Patienten und wirkt dauerhaft sturzprophylaktisch. Ein Duplexschnitt innerhalb der Randzone verbessert die Anpassung der Matratze an die Bettkinematik.

Die Schaumstoffkomponente ist von einem scherkraftmindernden Trikotstrumpf sowie einem bi-elastischen Polyurethanvollschutzbezug (Inkontinenzbezug) hoher Funktionalität umhüllt. Dieser ist formbeständig, flüssigkeits-, bakterien- und virendicht, wasserdampfdurchlässig, schwer entflammbar, beständig gegen Desinfektionsmittel und langlebig.

• **Indikation**

Die Matratze DEKUSOFT VISCO RZ dient als druckentlastendes Hilfsmittel zur Verhinderung des Auftretens (Prophylaxe) und zur Behandlungsunterstützung (Therapie) von Dekubitalulzerationen im Zusammenspiel mit weiteren kausal- und lokaltherapeutischen Maßnahmen. Sie ist für Menschen bestimmt, bei denen aufgrund einer Erkrankung, Behinderung oder aufgrund ihres Alters ein überwiegendes bzw. dauerhaftes Liegen notwendig ist und das Risiko der Entwicklung eines Dekubitus besteht. Sie ist für schmerzempfindliche und kachektische Patienten geeignet.

• **Wirkung | Verwendungszweck | Anwendung**

Die DEKUSOFT VISCO RZ wirkt nach dem Weichlagerungsprinzip. Die Liegefläche aus viscoelastischem Schaumstoff in Verbindung mit der Würfelstruktur im Inneren ermöglicht eine gute Anpassungsfähigkeit an die anatomischen Körperkonturen des Patienten, wobei sich der Auflagedruck auf eine größere Fläche verteilt. Dadurch verbessert sich die Durchblutung der Gewebereale und das Risiko eines Dekubitus wird minimiert. Aufgrund des wirksamen Zusammenspiels der physikalischen Materialeigenschaften der einzelnen Schaumstoffe und der Matratzenhöhe von 16 cm wird durch das Einsinken der Schwerpunktkörperareale in den Schaumstoff während der Rücken- oder Seitenlage und ein sanftes Gegenstützen bei Positionsveränderungen – neben der hohen statischen Druckentlastung – ein sehr angenehmer Liegekomfort erreicht.

• **Anwendungsbereich**

Die Matratze ist für den Einsatz im häuslichen Bereich sowie für den Einsatz in Alten- und Pflegeheimen bzw. Kliniken geeignet. Sie ist in jeder Art von Bett einsetzbar. Dieses muss eine stabile, ebene Liegefläche haben, welche mit den Außenmaßen der Matratze übereinstimmt und darf keine scharfen Kanten und Ecken aufweisen, welche die Matratze beschädigen könnten. Es ist darauf zu achten, dass das Bett über Matratzenhalter oder eine Rahmenkonstruktion verfügt, welche ein Herausrutschen der DEKUSOFT VISCO RZ verhindern. Die Weichlagerungsmatratze kann auf allen Lattenrosten und Gitterliegeflächen (verstellbar oder feststehend) eingesetzt werden. Die optimale Druckentlastung wird bei einer ebenen Lage der Matratze erreicht. Sie darf nur in Verbindung mit dem mitgelieferten Bezug und nicht ohne Bettlaken, welches auf der Matratze einen guten Sitz und wenig Faltenwurf aufweist, benutzt werden.

Die DEKUSOFT VISCO RZ ist für die Anwendung bei Patienten mit einem Gewicht von 25 kg bis maximal 120 kg vorgesehen.

Die klimatischen Bedingungen sollten bei 18 °C bis 40 °C Umgebungstemperatur und 20 % bis 75 % Luftfeuchtigkeit liegen.

• **Anwendungsrisiken | Kontraindikation**

Die DEKUSOFT VISCO RZ ist für Patienten/Bewohner mit Schaumstoffallergien nicht einzusetzen! Achten Sie bitte unbedingt auf die Gewichtsbeschränkungen für diese Matratze. Bei Verwendung in einem Bett mit Seitengittern ist zu überprüfen, ob für den Patienten Einklemm-/Einquetschgefahr oder das Risiko des Herausfallens besteht. Die Seitengitterhöhe muss ab Matratzenoberseite mindestens 22 cm betragen. Der Patient/Bewohner darf keinen direkten, andauernden Hautkontakt mit der Matratze haben. Schützen Sie die Matratze vor offenem Feuer (z. B. Zigarettenglut, Kerze). Es besteht Brandgefahr!

Hinweis: Für den Betreiber von Medizinprodukten ist die Medizinprodukte-Betreiberverordnung (MPBetreiberV) verbindlich. Er muss die entsprechende Sachkenntnis besitzen, um die Eignung des Produktes zu prüfen und das bestehende Dekubitusrisiko beurteilen zu können.

• **Material | Pflege und Reinigung**

Der Matratzenkern besteht aus elastischem Polyurethanschaum sowie einer Liegefläche aus viscoelastischem Schaumstoff und kann bei Bedarf mit haushaltsüblichen Mitteln gereinigt und durch Abwischen mit einem desinfektionsmittelgetränkten Tuch vom Anwender wischdesinfiziert bzw. mit Sättigungsdampf im VDV-Verfahren bis zu einer Temperatur von 75 °C autoklaviert werden.

Der Bezug der Matratze ist standardmäßig ein Vollschutzbezug Komfort blau. Er ist durch Öffnen des Reißverschlusses abnehmbar und kann im Fall einer Verunreinigung in der Waschmaschine mit haushaltsüblichen Mitteln bei 60 °C bis max. 95 °C gewaschen und vom Anwender desinfiziert werden. Die Wisch- oder Sprühdeseinfektion sollte ausschließlich mit chlorfreien Mitteln erfolgen, die durch den Ver-



Gebrauchsanweisung DEKUSOFT VISCO RZ

Weichlagerungsmatratze zur Dekubitusprophylaxe und -therapieunterstützung

bund für Angewandte Hygiene e. V. (VAH) geprüft und zugelassen sind. Die Gebrauchshinweise der verwendeten Reinigungs- und Desinfektionsmittel sind unbedingt zu beachten.

Die Aufbereitung der gesamten Einheit aus Vollschutzbezug und Schaumstoffkern kann – bei geöffnetem Reißverschluss des Bezuges – schonend mit Sättigungsdampf im VDV-Verfahren bei 75 ° C erfolgen.

Die DEKUSOFT VISCO RZ ist eine wiedereinsatzbare Matratze. Zwischen den Einsätzen ist sie hygienisch aufzubewahren und vor dem Wiedereinsatz nach der Empfehlung der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention (KRINKO) und des Bundesinstitutes für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) hygienisch aufzubereiten und gemäß MPBetreibV auf mögliche Beschädigungen zu prüfen. Beschädigte Bezüge sind zum Schutz des Matratzenkerns und zur Aufrechterhaltung der Matratzenfunktion auszutauschen.

• Lagerung

Wir empfehlen, die rollkomprimiert gelieferte Matratze DEKUSOFT VISCO RZ schnellstmöglich nach Erhalt zu entpacken, jedoch spätestens vor Ablauf von 3 Monaten. Die Matratze darf nur sauber, trocken und eben aufbewahrt werden. Eine Stapelhöhe von maximal 12 Stück sollte nicht überschritten werden. Auf der Matratze darf kein anderes Produkt gelagert werden, das sie beschädigen könnte.


• Maße

Artikelnummer	Abmessungen (B x T x H)	Ausführung/Bezug	Gewicht	GTIN
M17734	200 x 90 x 16 cm	Vollschutzbezug Komfort	13,0 kg	4056538998513
M17818	200 x 100 x 16 cm	Vollschutzbezug Komfort	14,1 kg	4056538998605

• Technische Daten

Patientengewicht	25–120 kg			
Raumgewicht • Stauchhärte	Liegeschicht:	50 kg/m ³ • 1,2 kPa		
	Trägerschicht:	40 kg/m ³ • 3,7 kPa		
	Randzone:	50 kg/m ³ • 8,0 kPa		
Material Inkontinenzbezug	Polyesterstrickgewebe mit Polyurethanbeschichtung			
Brandschutznorm	schwer entflammbar nach BS 7175 – Crib 5			
Pflege	Kern			
	Inkontinenzbezug			
Garantie	5 Jahre bei Bildung von Liegemulden			

• Ansicht

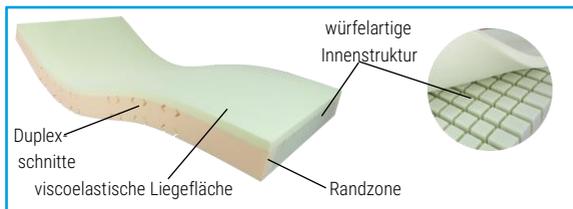

• Hinweis

Die Anwendung des Produktes kann regelmäßige Positionierungswechsel des Patienten/Bewohners nicht ersetzen.

Die Matratze ist entsprechend der vorliegenden Gebrauchsanweisung zu benutzen und diese ist für eventuelle Rückfragen sorgfältig aufzubewahren. Sie enthält wichtige Informationen, die für einen sachgerechten Einsatz notwendig sind. Dadurch können Schäden oder Gefährdungen durch Fehlanwendungen vermieden werden.

